

## MONTAGE ANLEITUNG | MOUNTING INSTRUCTION

93152 / 93153 / 93154 / 93155  
93156 / 93157 / 93158

RETTUNGSANHÄNGER | RESCUE TRAILER



Seitliche Rahmenteile montieren | Mounting of basic frame for cover



Vorderes Rahmenteil einstecken und festschrauben | Attach and fix front frame with screws




Befestigungen / Führungsschienen für Akja / Verletzentrage montieren


Mounting of fixation plate /guiding rails for Akja / Injured Stretcher

Siehe Beilagen (optional, je nach Ausstattungsvariante)  
See attached instructions (optional, depending on ordered configuration)


93152

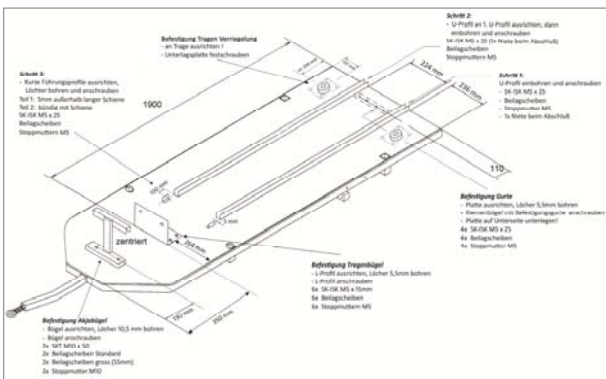


93154

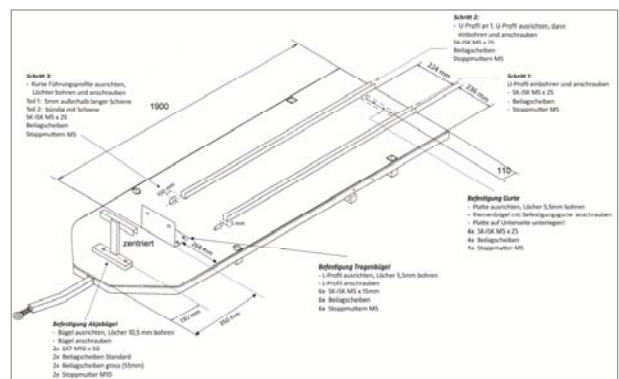



93155 / 93157

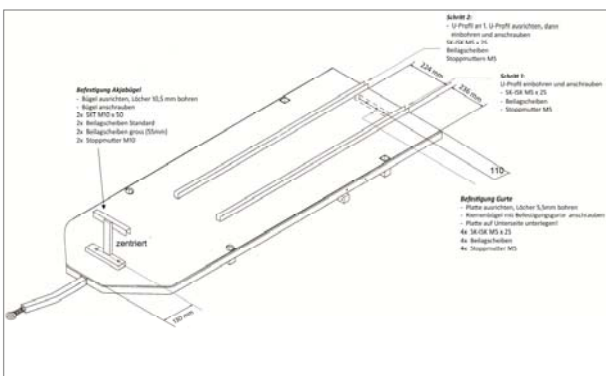


93152 / 93153 / 93154 / 93155  
93156 / 93157 / 93158

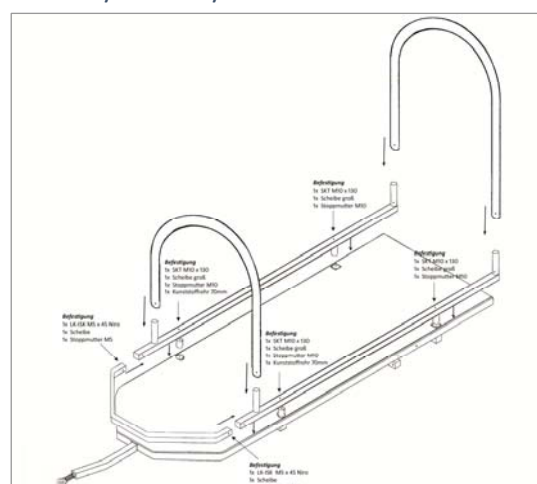

Überrollbügel aufstecken und fixieren | *Attach rollover bars and fix with splints*

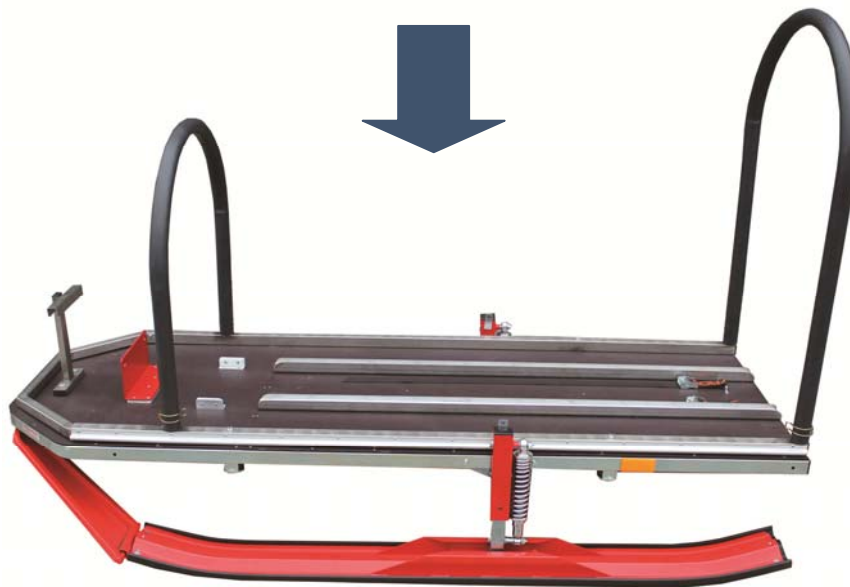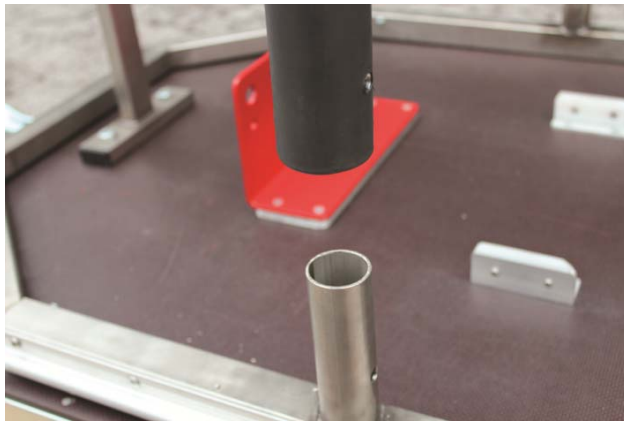

Glasfaserstab und Aluplatte in Stoffverdeck einziehen | *Insert glas fibre bar and alu plate*

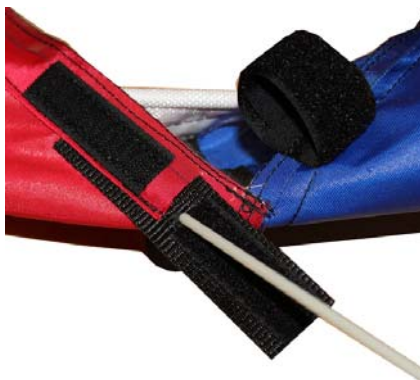


Stoffverdeck in seitliche Schienen einschieben | *Insert cover into guide rail*



Stoffverdeck von vorne nach hinten ziehen und öffnen | *Pull cover from front to end and open*



Klettverschluss im vorderen Innenbereich schließen | *Close Velcro fastener in the front area*

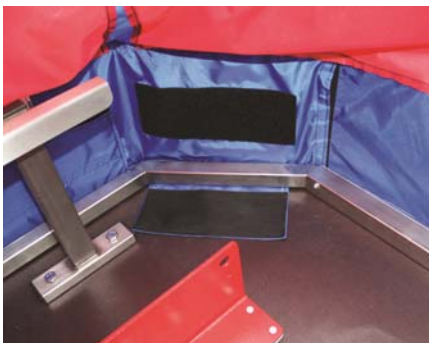

Verdeck am vorderen Bügel befestigen | *Fix cover at front rollover bar*



Stoffverdeck über hinteren Bügel stüpfeln | *Put cover over rear rollover bar*



Verdeck unter vorderen Rahmenbügel fixieren | *Fix cover below front frame bow*



Anhängekupplung einstecken und festschrauben | *Insert and fix tow coupling*



Verdeck vollständig schließen | *Close textile cover completely*




Anbringung der Erdnägel Tasche | *Add bag with fixation pegs*





Für die Montage der Anhänger Teile benutzen sie bitte die Montageanleitung des Anhängers, welche dem Paket beiliegt.

*For the installation of the trailer parts, please use the mounting instruction of the trailer, which is included.*

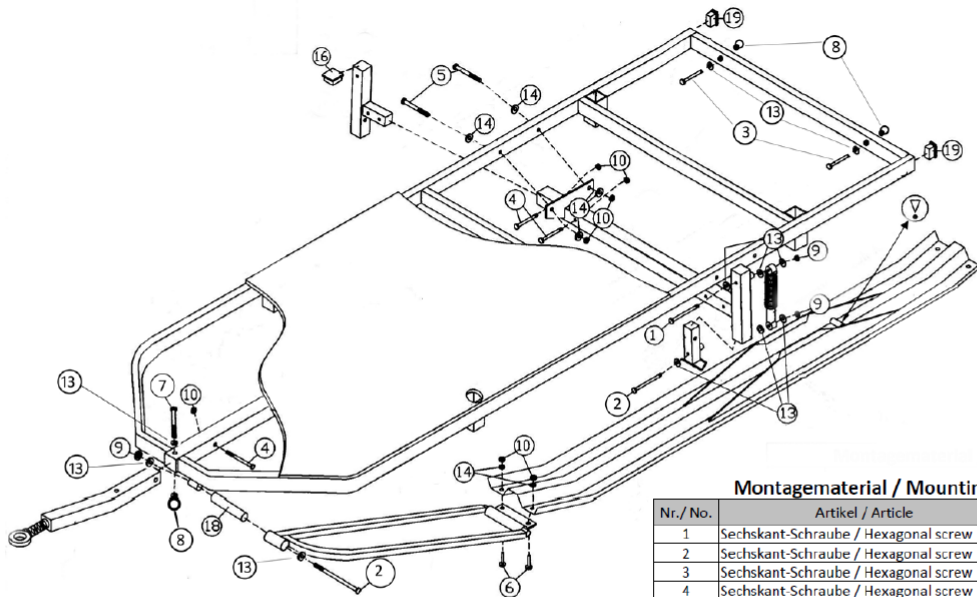

Montagematerial / Mounting Material

Nr./ No.	Artikel / Article	Dim.	#
1	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 10 x 110	2
2	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 10 x 100	4
3	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 10 x 35	2
4	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 8 x 55	5
5	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 8 x 40	4
6	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 8 x 30	4
7	Sechskant-Schraube / Hexagonal screw	M 10 x 55	1
8	Ringkopf-Mutter / Ring-headed screw nut	M 10	3
9	Stop Mutter / Stop-screw nut	M 10	6
10	Stop Mutter / Stop-screw nut	M 8	13
13	Beilagscheibe / Flat washer	M 10 x 30	19
14	Beilagscheibe / Flat washer	M 8 x 20	12
16	Abdeckung / Plug connection	50 x 50	2
18	Niro Hülse / Stainless steel bush	80 x 15/1	2
19	Abdeckung / Plug connection	40 x 20	2

**TYROMONT**  
Alpine Rescue Equipment

**RETTUNGSANHÄNGER  
RESCUE TRAILER**

MG / 11.12.2014 Version: 3.0

Montageanleitung - Kufen für Anhänger  
Mounting Instruction - Runners for Trailer

**93152 / 93153 / 93157**