

# GEBRAUCHSANWEISUNG

81365 | VAKUUMPUMPE COMPACT



Die Kunststoffpumpe COMPACT von TYROMONT ist ein Produkt, welches speziell für die Einsätze entwickelt wurde, wo jedes Gramm zählt und eine einwandfreie Funktion gewährleistet sein muss. Durch die Verwendung von hochfestem Kunststoff, die robuste Bauweise und das durchdachte Konzept ist die Vakuumpumpe COMPACT ideal für die harten Anforderungen von Rettungsdienste geeignet.

## Eigenschaften

Komplett aus hochfestem Kunststoff gefertigte manuelle Vakuumpumpe. Absaugung wird durch das Heben und Senken des Pumpenkolbens erzielt. Durch die spezielle Bauweise der Vakuumpumpe kann eine Absaugung ohne größeren Kraftaufwand von nur einer Person durchgeführt werden. Durch die schlanke Zylinderform ist ein Einfaches umgreifen mit einer Hand problemlos möglich.

Der neu konzipierte Adapter ermöglicht ein rasches und hocheffizientes Absaugen von Vakuummatratzen und – schienen. Der kältebeständige Silikonschlauch ermöglicht auch bei extremen Bedingungen ein einwandfreies Handling.

## Sicherheitshinweise

Hitzequelle oder offenes Feuer können zu Beschädigungen am Material führen bzw. eine Gefahr für den Benutzer darstellen. Stellen Sie vor Gebrauch fest, dass sich die Pumpe in einem einwandfreien Zustand befindet.

## Lagerung / Aufbewahrung

Trocken lagern; nicht extremen Hitze- oder Kältequellen über eine längere Zeit aussetzen. Sollte das Gerät längere Zeit nicht benutzt worden sein, sollte das Schlauchstück auf eventuelle Beschädigungen wie Risse kontrolliert werden.

## Reinigung

Die Vakuumpumpe kann mit Wasser und Seife abgewaschen werden. Ein Eindringen von Flüssigkeiten am Kolbenkopf sollte vermieden werden. Die Vakuumpumpe kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden (Wischdesinfektion). Die Verwendung von Scheuermitteln sollte vermieden werden, da dies zu Kratzern und Beschädigungen am Material führen kann.