

MONTAGE ANLEITUNG | MOUNTING INSTRUCTION

93076 SCHUTZSACK VERLETZTENTRAGE | INJURED BAG STRETCHER




Schutzsack im Kopfbereich über Trage ziehen und grüne Gurte durch Öffnungen durchschlaufen.
Put injured bag over upper lying area and the two green belts through the slots.



**Klettverschluß auf Rückseite schließen und Quer-Lasche durch Schlitz durchziehen.
Close Velcro on back side of lying area and pull Velcro flap through large slot.**



**Gurte durchschlaufen, festziehen und auf Klettband fixieren.
Close black belt and press the belt on the Velcro closing.**

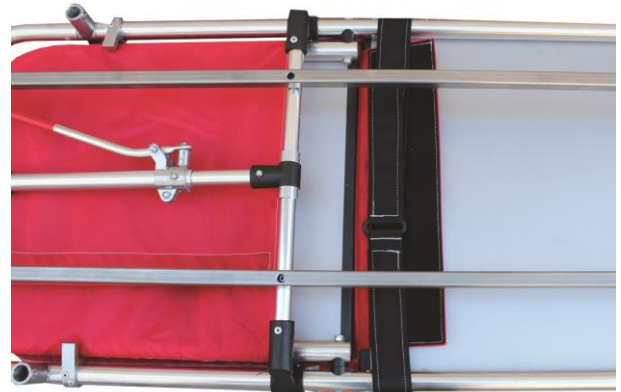

**Gurt im Fußbereich auf der Unterseite der Trage schließen, dabei den Gurt durch die Riemenbügel ziehen.
Close black belt in the foot area of the lying area by putting the belt through the strapbolt.**

